

Algemene beschrijving

Katoenen beschermend gezichtsmasker

2-lagig

Herbruikbaar

Wasbaar

Universele maat


De kleur van de sluitlintjes kan variëren.

Samenstelling

Hoofdmateriaal: Katoen

Sluitlintjes: katoen

Draad: katoen

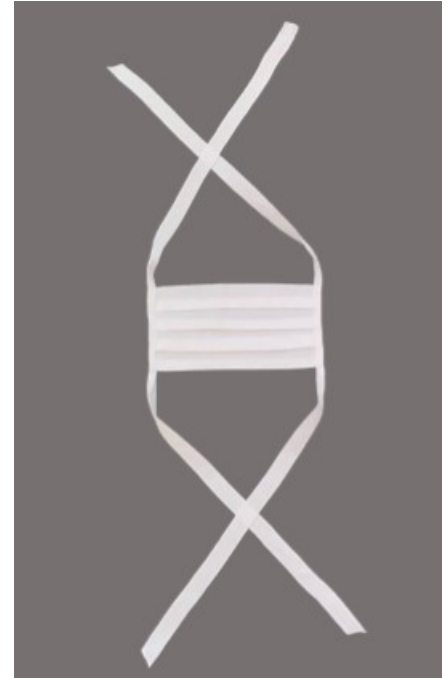

Toepassing

- * We raden aan om het gezichtsmasker te wassen voor het eerste gebruik.
- * Was uw handen grondig voordat u het masker gebruikt.
- * Een correct aangebracht masker moet de mond, neus en kin bedekken.
- * Raak bij het afdoen van het masker alleen de sluitlintjes aan, niet het deel dat de lucht heeft gefilterd.
- * Was uw handen grondig na het afdoen van het masker en was ook uw gezicht.
- * Als het masker nat, besmet of gebruikt is, moet het vervangen worden.
- * Als u het grootste deel van de dag een masker moet dragen, is het nodig om er meerdere te hebben.

Onderhoud

De gezichtsmaskers kunnen hergebruikt worden mits inachtneming van onderstaande instructies:

- * We raden aan om gebruikte maskers te wassen in kokend water gedurende minstens 5 minuten. Gebruik bij het wassen in de wasmachine een linteretas en was op een temperatuur van max. 95 ° C. Laat de maskers daarna vrij drogen.
- * Strijk de maskers op het hoogste niveau of steriliseer ze.
- * Bewaar de maskers bij kamertemperatuur in een droge en donkere omgeving.



Verpakking

- * Basisverpakking: 50 maskers (verpakt 5 x 10 stuks)
- * Kartonnen doos 63 x 35 x 27 cm: 500 maskers
- * Kartonnen doos 63 x 52 x 30 cm: 1.000 maskers

Verwijdering

Versleten maskers zijn afval en moeten afgevoerd worden volgens de lokale regels.
Besmette maskers moeten worden afgevoerd als gevaarlijk afval.



**Deze maskers werden niet getest en bieden dus geen erkende bescherming tegen het coronavirus.
Volg de basisprincipes inzake hygiëne!**

Geproduceerd in Tsjechië