


Beschermend gezichtsmasker met uitneembare nano filter

Algemene beschrijving

Katoenen beschermend gezichtsmasker met sluitlintjes
3-lagig, inclusief verwijderbare nano filter
Uitneembaar onscherp stalen plaatje voor het vastzetten van het masker bij de neus
Herbruikbaar
Wasbaar
Universele maat
De kleur van het masker en de sluitlintjes kan variëren.

Samenstelling

Hoofdmateriaal: Katoen 100% - 100 – 170 g/m²
Uitneembare nano filter - 3-lagig laminaat, +/- 50 g/m²: niet-geweven stof - 100% PES / nano filterlaag / niet-geweven stof - 100% PES
Sluitlintjes: katoen 100%
Draad: katoen

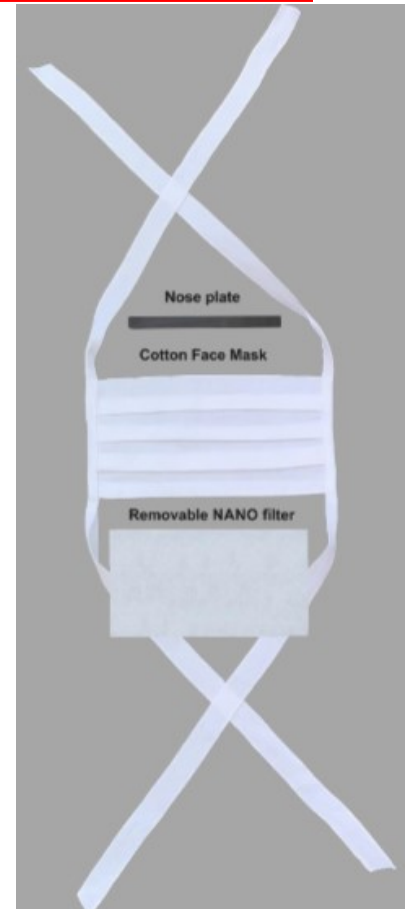

Toepassing

- * We raden aan om het gezichtsmasker te wassen voor het eerste gebruik. Hiervoor moet de nano filter verwijderd worden.
- * Was uw handen grondig voordat u het masker gebruikt.
- * Een correct aangebracht masker moet de mond, neus en kin bedekken.
- * Raak bij het afdoen van het masker alleen de sluitlintjes aan, niet het deel dat de lucht heeft gefilterd.
- * Was uw handen grondig na het afdoen van het masker en was ook uw gezicht.
- * Als het masker nat, besmet of gebruikt is, moet het vervangen worden.
- * Het is noodzakelijk om de nano filter regelmatig te vervangen.
- * Bij gebruik van het gezichtsmasker in extreme omstandigheden of in geval van mechanische schade moet de nano filter onmiddellijk vervangen worden.
- * We raden aan om de nano filter te vervangen na 8 uur intensief gebruik.
- * Als u het grootste deel van de dag een masker moet dragen, is het nodig om er meerdere te hebben.

Afmetingen

Gezichtsmasker: 20 x 11 cm
Nano filter: 17 x 9 cm

Onderhoud

De gezichtsmaskers kunnen hergebruikt worden mits inachtneming van onderstaande instructies:

- * Verwijder de nano filter en het stalen plaatje voor het wassen.
- * We raden aan om gebruikte **witte** maskers te wassen in kokend water gedurende ongeveer 5 minuten. Gebruik bij het wassen in de wasmachine een linterietas en was op een temperatuur van max. 95 ° C.
- * We raden aan om gebruikte **gekleurde** maskers te wassen in kokend water gedurende max. 5 minuten. Gebruik bij het wassen in de wasmachine een linterietas en was op een temperatuur van max. 65 ° C.
- * Laat de maskers daarna vrij drogen.
- * Strijk de maskers op het hoogste niveau of steriliseer ze.
- * Plaats hierna een nieuwe nano filter en stalen plaatje in het katoenen masker.
- * Bewaar de maskers bij kamertemperatuur in een droge en donkere omgeving.

Maintenance symbols – white face mask



Maintenance symbols – coloured face mask



Verpakking

- * Basisverpakking: 50 maskers (verpakt 5 x 10 stuks)
- * Kartonnen doos 63 x 35 x 27 cm: 500 maskers
- * Kartonnen doos 63 x 52 x 30 cm: 1.000 maskers

Verwijdering

Versleten filters en maskers zijn afval en moeten afgevoerd worden volgens de lokale regels. Besmette filters en maskers moeten worden afgevoerd als gevaarlijk afval.



Deze maskers werden niet getest en bieden dus geen erkende bescherming tegen het coronavirus. Volg de basisprincipes inzake hygiëne!