

Beschermend gezichtsmasker Nano textiel

Algemene beschrijving

100% PES-gezichtsmasker met filter in nanovezel
3-lagig laminaat
Wegwerp
Oorelastieken
Ergonomische pasvorm
Verkrijgbaar in maten: S, M, L



Samenstelling

3-lagig laminaat, +/- 50 g/m²: niet-geweven stof - 100% PES / nano filterlaag / niet-geweven stof - 100% PES

Toepassing

- * Was uw handen grondig voordat u het masker gebruikt.
- * Een correct aangebracht masker moet de mond, neus en kin bedekken.
- * Raak bij het afdoen van het masker alleen de oorelastieken aan, niet het deel dat de lucht heeft gefilterd.
- * Was uw handen grondig na het afdoen van het masker en was ook uw gezicht.
- * Het is noodzakelijk om het masker in nano textiel regelmatig te vervangen.
- * Bij gebruik van het gezichtsmasker in extreme omstandigheden of in geval van mechanische schade moet het masker onmiddellijk vervangen worden.
- * Als het masker nat, besmet of gebruikt is, moet het vervangen worden.
- * Als u het grootste deel van de dag een masker moet dragen, is het nodig om er meerdere te hebben.
- * Bewaar de maskers bij kamertemperatuur in een droge en donkere omgeving.

Verwijdering

Versleten maskers zijn afval en moeten afgevoerd worden volgens de lokale regels.
Besmette maskers moeten worden afgevoerd als gevaarlijk afval.

Verpakking

- * Basisverpakking: 100 maskers
- * Kartonnen doos 63 x 35 x 27 cm: 1.000 maskers
- * Kartonnen doos 63 x 52 x 30 cm: 2.000 maskers



Deze maskers werden niet getest en bieden dus geen erkende bescherming tegen het coronavirus.

Volg de basisprincipes inzake hygiëne!